

Медицинские изделия Аквалор, содержащие морскую воду

Инструкция по применению медицинского изделия

Средство для промывания полости носа для детей «Аквалор беби» 15 мл

1. Основные характеристики

Описание: Средство для промывания полости носа для детей «Аквалор беби» 15 мл представляет собой пластиковый флакон-капельницу, герметично закрытый завинчивающейся пластиковой крышкой. Содержание флакона-капельницы – прозрачная бесцветная жидкость без запаха, со слабосоленым вкусом, являющаяся стерильным раствором морской воды (в 100 мл содержится 30-33 мл натуральной морской воды) с изотонической концентрацией NaCl.

Не содержит консервантов. Не является лекарственным средством.

Средство для промывания полости носа для детей «Аквалор беби» предназначено для детей с рождения.

2. Техническая спецификация

Технические и функциональные характеристики:

Наименование параметра	Описание
Описание и устройство изделия	Пластиковый флакон-капельница герметично закрытый завинчивающейся пластиковой крышкой
Объем наполнения	15 мл
Характеристика содержимого	Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, со слабосоленым вкусом, являющаяся стерильным раствором морской воды (в 100 мл содержится 30-33 мл натуральной морской воды), с изотонической концентрацией NaCl
Состав содержимого	натуральная морская вода, очищенная вода
pH	6,0 - 8,5
Содержание NaCl	8 - 11 г/л
Условия хранения	Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

3. Назначение медицинского изделия

Средство для промывания полости носа для детей «Аквалор беби» применяется для профилактики и комплексного лечения острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), состояний после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух, в период подъема простудных заболеваний, а так же для ежедневной гигиены полости носа и носоглотки.

Предназначено для удаления слизи, уменьшения выделений, размягчения и удаления корок, увлажнения слизистой оболочки полости носа.

Оказывает благоприятное воздействие на слизистую оболочку полости носа и носоглотки, способствует уменьшению заложенности носа и восстановлению носового дыхания.

После промывания полости носа Средством для промывания полости носа для детей «Аквалор беби» повышается терапевтическая эффективность лекарственных средств наносимых на слизистую оболочку полости носа, сокращается продолжительность респираторных заболеваний, снижается риск распространения инфекции в околоносовые пазухи и полость уха.

Условия применения: для индивидуального применения и в условиях медицинских учреждений.

4. Показания и противопоказания к применению

Показания к применению:

- Профилактика и комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):
 - острые и хронические риниты (насморк)
 - острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит)
 - острые и хронические аденоидиты
 - аллергические и вазомоторные риниты
 - субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки)
- Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.)
- Ежедневная гигиена полости носа и носоглотки
- Состояние после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух

Противопоказания к применению:

- Индивидуальная непереносимость компонентов содержимого флакона-капельницы

5. Подготовка к работе и порядок работы

Капать по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день, при необходимости можно чаще.

В целях гигиены, а также для облегчения состояния при острых и хронических инфекционных и воспалительных заболеваниях закапывают по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

Длительность и кратность применения средства не ограничены.

6. Указания по санитарной обработке: перед использованием медицинского изделия обработать наконечник флакона-капельницы раствором этилового спирта.

7. Упаковка и маркировка

Первичная упаковка - пластиковый флакон-капельница, герметично закрытый завинчивающейся пластиковой крышечкой. Вторичная упаковка – картонная пачка.

8. Правила хранения, транспортировки и использования

Срок годности - 3 года. Использовать до даты, указанной на упаковке. После вскрытия флакона использовать в течение 45 дней.

Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Средство для промывания полости носа для детей «Аквалор беби» транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре от 1 °С до 40 °С.

Средство для промывания полости носа для детей «Аквалор беби» относится к классу А классификации медицинских отходов согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.7.2790-10. Учет и контроль движения отходов классов А осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сбор отходов обеспечивает дистрибьютор (договорные сервисные организации или договорные сервисные техники).

9. Организация-изготовитель, гарантии

Аурена Лабораторис ЭйБи, Швеция. ИС ЛАБ, Франция.

Производитель гарантирует качество изделия в течение всего срока годности